

premier®

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Removalon®-I

Detergente per strumenti



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Produttore:

Premier® Dental Products Company

1710 Romano Drive

Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.

888-670-6100 • 610-239-6000

premierdentalco.com • Fabbricato negli USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Istruzioni per l'uso
90115-2 0421097 Rev0 PDF

Uso previsto:

Per dissolvere in modo agevole, veloce e sicuro cementi carbossilati, vetro-ionomerici e al fosfato di zinco da strumenti, bande ortodontiche, corone, ponti, faccette, lastre di vetro, inlay ecc.

Descrizione del dispositivo:

Premier® Removalon®-I è un detergente per strumenti attivato ad acqua che rimuove i materiali cementanti dagli strumenti dentari. Removalon®-I dry pack è una polvere concentrata che si dissolve rapidamente, formando una soluzione sicura ed efficace.

Controindicazioni:

Non utilizzare Removalon®-I nelle seguenti condizioni:

- Se il contenitore o il tappo è rotto/danneggiato.
- Il contenitore non si estende completamente.

PRECAUZIONI:

- Esclusivamente monouso.
- Non miscelare con altri detersivi e contaminanti.
- Conservare il prodotto solo nel contenitore originale.
- Evitare l'eccessiva diluizione.
- Estendere il contenitore e si consiglia di riempire con acqua di rubinetto calda.
- Lavare a fondo la pelle esposta e le mani dopo la manipolazione.

AVVERTENZE:

- In caso di esposizione, rimuovere le lenti a contatto.
- **OCCHI:** sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.
- **CUTE:** sciacquare abbondantemente con acqua.
- **INGESTIONE:** bere molta acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

Eventi avversi:

- IN CASO DI INGESTIONE:
 - » Nocivo, può causare nausea e vomito.
 - » Può essere irritante per bocca e gola.
 - » Può causare reazioni di tipo allergico.
- Può causare irritazione cutanea, danni oculari e reazioni allergiche cutanee.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

Contenuto e preparazione:

N. articolo	Prodotto/Dispositivo
9011005	Removalon-I DRY PK SCATOLA DA 6
8101998	Removalon-I DRY PK SCATOLA SINGOLA

Materiali:

Formulazione granulata anidra con acido citrico, ecocompatibile e biodegradabile.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Aprire il tappo flip-top o il coperchio.
- Tenere la bottiglia dritta e lontana dal viso per evitare possibili inalazioni di polvere. Tirare verso l'alto.
- Svitare il tappo e riempire la bottiglia con acqua calda di rubinetto fino al contrassegno.
- Agitare bene per 15-20 secondi.

Senza dispositivo a ultrasuoni:

- Versare Removalon®-I in un contenitore di metallo, vetro o plastica in quantità sufficiente a ricoprire le superfici degli strumenti da pulire.
- Immergere gli strumenti ecc. in Removalon-I e lasciare in immersione.
- Il tempo necessario per la dissoluzione del cemento dipende dal grado di indurimento e dallo spessore dei depositi. In media sono necessari 15 minuti.
- Un'immersione prolungata può causare alterazioni del colore delle superfici. Estrarre dopo 15 minuti.

Con dispositivo a ultrasuoni:

- Riempire un becker o la vaschetta del bagno con Removalon-I.
- Immergere gli strumenti da pulire, assicurandosi che le zone dov'è presente il cemento siano ricoperte di Removalon-I.
- La dissoluzione del cemento richiede in media 5 minuti.
- Una volta rimossi dalla soluzione di Removalon-I, sciacquare gli strumenti con acqua.
- Qualora Removalon-I venisse a contatto con la cute, sciacquare abbondantemente con acqua.
- Removalon-I può essere riutilizzato, ma la soluzione usata va gettata una volta che ha accumulato una quantità sufficiente di residui.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Periodo di conservazione:

Il prodotto non ha un periodo di conservazione.

Smaltimento:

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto medico a rischio biologico in conformità alle linee guida/procedure della struttura o dell'istituto.

Per ulteriori informazioni:

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito premierdentalco.com oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Conservare in un luogo fresco e asciutto
	Evitare la luce solare diretta
	Dispositivo medico
	UKCA