



Vac Attak™ GREEN & Vacu Blast™

Nettoyants enzymatiques pour systèmes d'évacuation



premier Inspired solutions for daily dentistry®



Fabricant :
Premier® Dental Products Company,
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 É.-U.
888 670-6100 • 610 239-6000
premierdentalco.com • Fabriqué aux États-Unis



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

Utilisation prévue :

Vac Attak™ GREEN et Vacu Blast™ sont conçus en tant que nettoyeurs enzymatiques de haute performance pour systèmes d'évacuation, qui sont sécuritaires pour une utilisation avec les séparateurs d'amalgames.

Description du produit :

Premier® Vac Attak™ GREEN et Vacu Blast sont des nettoyeurs enzymatiques de haute performance pour systèmes d'évacuation utilisés dans les cabinets dentaires. Vac Attak™ GREEN est fourni en forme de poudre, tandis que Vacu Blast est en forme de liquide.

Contre-indications :

Ne pas utiliser Vac Attak™ GREEN et Vacu Blast™ lorsque les conditions suivantes sont présentes :

- Si le contenant ou le capuchon est brisé ou endommagé.
- Ne doit pas être utilisé avec des instruments en aluminium anodisé.

PRÉCAUTIONS :

- Ne pas mélanger le produit avec d'autres détergents ou contaminants.
- Éviter une dilution excessive.
- Conserver le produit dans son contenant original.
- Garder les contenants hermétiquement fermés lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas placer une cuillère humide dans le contenant.
- Laver la peau exposée et les mains soigneusement après la manipulation.

AVERTISSEMENTS :

- Enlever les lentilles de contact en cas d'exposition.
- **YEUX** – Rincer à grande eau pendant 15 minutes en cas d'exposition. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- **PEAU** – Rincer à grande eau.
- **INGESTION** – Boire beaucoup d'eau. Consulter rapidement un médecin.

Effets indésirables :

- EN CAS D'INGESTION :
 - » Nocif, peut provoquer des nausées et des vomissements.
 - » Peut être irritant pour la bouche et la gorge.
 - » Peut provoquer des réactions de type allergique.
- Peut causer une irritation de la peau, des lésions oculaires et des réactions allergiques de la peau.

Si un incident grave se produit en lien avec le produit, veuillez signaler cet incident au fabricant ou à une autorité compétente dans l'État membre où le produit a été utilisé.

Contenu et mise en place :

N° d'article	Spécifications du produit	N° d'article	Spécifications du produit
9011995	ÉCHANILLON Vac Attak GREEN (1 emballage)	9011107	Vacu Blast (caisse de 12)
9011105	Vac Attak GREEN (CAISSE DE 6)	9011109	Vacu Blast (flacon unique)
8101105	Vac Attak GREEN, pot unique	8101107	Vacu Blast, échantillon

Contenu :

Vac Attak Green – Formule enzymatique puissante conforme aux exigences de l'EPA, possède une fraîche odeur d'agrumes.

Vacu Blast – Nettoyeur enzymatique puissant sans phosphate et sans chlore, à l'odeur d'eucalyptus.

MODE D'EMPLOI :

Vac Attak™ Green	Vacu Blast™
<ol style="list-style-type: none">1. Remplir l'évier d'évacuation ou un autre contenant avec 946 ml (32 oz liq.) d'eau tiède du robinet.2. Prendre une cuillerée (8 g) de poudre nettoiyante du contenant.3. Répandre la poudre dans l'eau et laisser s'écouler 30 à 45 secondes pour une dissolution complète.4. Rincer le système avec la solution.5. Rincer à nouveau le système à l'eau du robinet après le nettoyage. <p>Attention :</p> <ul style="list-style-type: none">• Après la première utilisation, la puissante action nettoiyante de Vac Attak GREEN peut laisser des débris accumulés que l'on doit décoller. Veiller à nettoyer le filtre/conduit après utilisation pour une efficacité maximale.• Hautement efficace pour déloger tous les types de débris organiques.• Changer la solution quotidiennement.	<ol style="list-style-type: none">1. Desserrer le capuchon de la chambre à valve doseuse (NE PAS LE RETIRER).2. Presser à partir du milieu du flacon jusqu'à ce que le liquide atteigne la marque de 15 ml (½ oz liq.).3. Retirer le bouchon de la chambre à valve doseuse et verser le contenu dans 946 ml (32 oz liq.) d'eau.4. Mélanger soigneusement avant l'utilisation. <ul style="list-style-type: none">• Pour les plus gros cabinets, presser à partir du milieu du flacon jusqu'à ce que le liquide atteigne la marque de 30 ml (1 oz liq.).• Il est recommandé de diluer 30 ml (1 oz liq.) du produit (Vacu Blast) avec 1 892 ml (64 oz liq.) d'eau.

Entreposage :

Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

Durée de conservation :

Vac Attak™ Green n'a pas de durée de conservation. Vacu Blast™ a une durée de conservation de trois (3) ans à partir de la date de fabrication.

Élimination :

Après l'utilisation, éliminer la solution en tant que déchet médical biologiquement dangereux, conformément aux lignes directrices ou aux procédures des installations ou de l'institution.

Pour plus d'information :

Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d'emploi, visiter le site premierdentalco.com ou appeler Premier au numéro 610 239-6000.

Symboles	Signification du symbole
	Fabricant
	Numéro de lot
	Avertissement, voir le mode d'emploi
	Conserver le produit dans un endroit frais et sec
	Éviter les rayons directs du soleil
	Produit à usage médical
	UKCA